



# *Ora-Aid*


cerotto per medicazione intraorale

visita  
[ora-aid.it](http://ora-aid.it)

## CARATTERISTICHE e BENEFICI

**Per la medicazione e la protezione di ferite e lesioni nel cavo orale.  
Privo di eugenolo.**


- Nuovo concetto di medicazione intraorale;
- Protegge ferite e lesioni dal cibo, dai batteri e dal fumo di sigaretta;
- Dotato di una forte capacità adesiva grazie al polimero idrofilo;
- Facile da tagliare e modellare;
- La saliva ne aumenta il potere adesivo;
- Riduce la sensazione di irritazione;
- Pratico e facile da usare;
- Il profumo di menta aiuta a ridurre l'alitosi
- Contiene Vitamina E

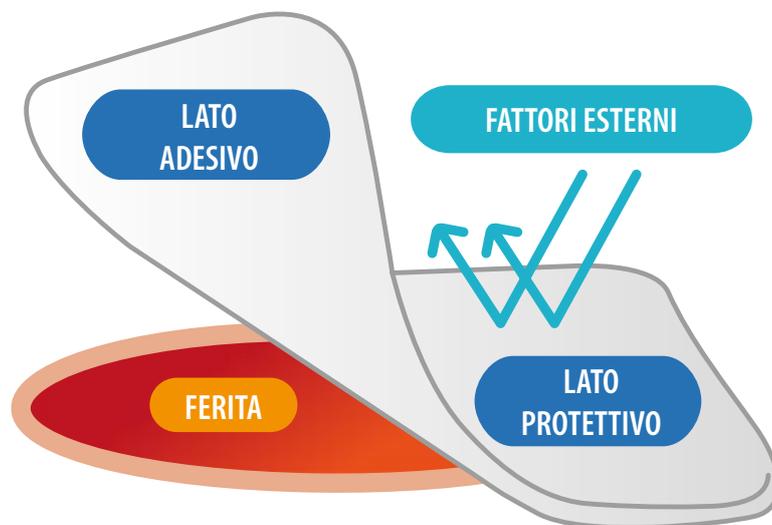

## INDICAZIONI

**Applicabile in tutti i casi di ferite, lesioni o irritazioni nel cavo orale.**

- Favorisce la guarigione dopo interventi chirurgici;
- Ferite aperte o con punti di sutura;
- In alcuni casi può sostituire la sutura;
- Ulcere e afte;
- Allevia l'irritazione causata da trattamenti ortodontici;
- Protegge le suture dal contatto con la lingua;
- Protegge lo smalto e i denti sensibili;
- Rinfresca la bocca dopo interventi chirurgici;
- Aiuta l'emostasi.

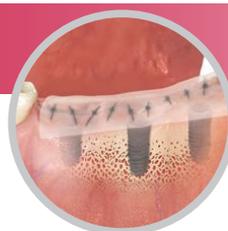

IMPLANTOLOGIA



CHIRURGIA



PARADONTITI




ESTRAZIONI



ORTODONZIA



STOMATITI

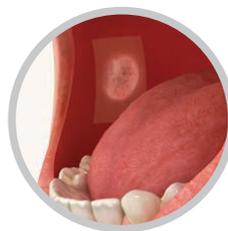

AFTE



INFEZIONI





## ISTRUZIONI e CONSERVAZIONE

### Istruzioni

- ① Irrigare la ferita con soluzione sterile o salina;
- ② Tagliare Ora-Aid in una forma e misura adatta;
- ③ Asciugare la ferita dall'umidità dolcemente con una garza. Un'essudazione eccessiva può ridurre la forza adesiva e la sua durata;
- ④ Rimuovere la pellicola trasparente e applicare sulla ferita;
- ⑤ Premere delicatamente Ora-Aid per 5-10 secondi fino a che Ora-Aid aderisca alla ferita (in alcuni casi è necessario ripetere la pressione).

### Conservazione

- ① Conservare il prodotto a temperatura ambiente (1°C~35°C), lontano da fonti dirette di luce e calore;
- ② Il mancato rispetto delle norme di conservazione può causare una riduzione delle prestazioni del prodotto (adesività, riassorbimento).

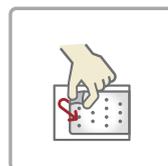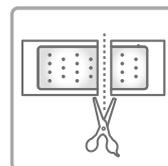

## PRECAUZIONI E CAUTELE

### Precauzioni

- ① Leggere attentamente le avvertenze prima dell'uso;
- ② Non utilizzare il prodotto se esso appare danneggiato o contaminato prima dell'uso (alcune bollicine sulla superficie del prodotto sono causate dal processo produttivo e quindi innocue);
- ③ È un dispositivo medico monouso. Se riutilizzato, il prodotto potrebbe causare infezione, contaminazione e infiammazione.

### Cautele durante l'utilizzo

- ① Se si manifestano gonfiore, reazioni allergiche, nausea o segni di infezione, consultare un medico;
- ② Non utilizzare su ferite profonde con sanguinamento eccessivo;
- ③ Non rimuovere Ora-Aid con forza. La parte adesiva si dissolve e cade automaticamente.
- ④ Rimuovere dalla ferita la parte che non ha aderito bene;
- ⑤ Prestare molta attenzione nel rimuovere la pellicola protettiva prima di andare a letto e nei bambini (sotto i 5 anni).



# Ora-Aid

cerotto per medicazione intraorale



## ORA 202

25x15mm x 2 20ea



## ORA 205

50x15mm x1 20ea



## ORA 500

25x15mm x2 25ea  
50x15mm x1 25ea



GUARDA LE  
VIDEO-ISTRUZIONI



scopri di più su  
[ora-aid.it](http://ora-aid.it)

distribuito da

**ROEN**  
dental products

ROEN S.a.s. di Boarolo Paolo e Marco & C.  
Via Torino n° 23 - 10044 Pianezza (TO)

Phone: 011 9682604

[www.roen.it](http://www.roen.it) - [info@roen.it](mailto:info@roen.it)